



Hladina I		Hladina II	
KÓD 18005 20 x 5 ml	KÓD 18009 5 x 5 mL	KÓD 18007 20 x 5 ml	KÓD 18010 5 x 5 mL
Výhradne na <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratóriách			

## BIOCHEMICKÉ KONTROLNÉ SÉRUM (Hovädzie) I,II

### ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Biochemické kontrolné sérum je určené výhradne na internú laboratórnú kontrolu kvality a je pripravené v odporúčaných a akceptovateľných hodnotách.

### ZLOŽENIE

**Biochemické kontrolné sérum.** Na 5ml. Lyofilizované hovädzie sérum obsahujúce komponenty v koncentráciách vhodných na kontrolu kvality v klinických laboratóriách. Sérum neobsahuje konzervačné látky, ktoré by mohli interferovať pri testovaní.

### PRÍPRAVA A POUŽITIE

1. Opatrne otvorte fľaštičku tak, aby nedošlo ku strate lyofilizovaného materiálu.
2. Do fľaštičky napipetujte presne 5,0 mL destilovanej vody. Hodnoty komponentov závisia od presnosti postupu rekonštitúcie.
3. Uzavrte fľaštičku zátkou a nechajte ju stáť 20 minút pri izbovej teplote.
4. Opatrne premiešajte, zabráňte vzniku peny, aby došlo ku kompletnému rozpusteniu lyofilizátu.
5. S rozpusteným kontrolným sérom zaobchádzajte a pracujte ako so sérom pacienta.

### SKLADOVANIE A STABILITA

Skladujte pri 2-8°C.

Lyofilizované Biochemické kontrolné sérum je stabilné do expirácie uvedenej na štítku fľaštičky.

Komponenty v už raz otvorenom materiáli sú stabilné minimálne 7 dní pri 2-8°C, okrem:

– Aktivita Alkalickej fosfatázy sa s časom môže zvyšovať.

Pre dlhšiu dobu skladovania sérum zamrazte. Sérum je možné zamraziť iba raz.

### ŠPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Koncentrácie jednotlivých komponentov a ich sledované množstvo vrátane návazností sú uvedené v tabuľke originálnej príbalovej informácie.

Sledované množstvá komponentov môžu byť zaručené iba za predpokladu použitia reagentov a postupu pri meraní odporúčaného BioSystems.

Odporúčané intervaly boli stanovené na základe predchádzajúcich skúseností v medzilaboratórnej variabilite stanovení. Uvedené hodnoty sú iba orientačné. Každé laboratórium by si malo stanoviť svoje vlastné parametre presnosti.

### UPOZORNENIE

Slovenský preklad k 23.1.2018.

Vzhľadom k novej inovácii výrobku sa odporúča prekontrolovať slovenský preklad s originálnym príbalovým letákom tak, že sa porovnajú identifikačné čísla uvedené v zápätí. Originálny návod nájdete v súprave a na internetovej adrese [www.biosystems.es](http://www.biosystems.es).

Slovenský návod je k dispozícii na [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz).

Poznámka :

Kontrolné sérum pre ACE, albumín, celkový a priamy bilirubín, celkové žilové kyseliny, kreatinín, glukóza, laktát, celkové proteíny, urea, kyselina močová, cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceridy, ACP, ALP, a-amyláza, b-hydroxybutyrát, ALT, AST, CK, g-GT, LDH, lipáza, Ca, Cl, Fe, Mg, P, K, Na a Zn

### Výhradný distribútor:

**ČR** : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha5, tel.: +420 257 220 760

**SK** : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, tel.: + 421 264 774 591

V prípade mimoriadnych udalostí:

**ČR** : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK, tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

**SK** : Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166