



Kód 18 011 5 x 5 mL
SKLADOVÁNÍ PŘI 2-8°C
Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích

## BIOCHEMICKÝ KALIBRÁTOR (hovězí)

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Biochemický kalibrátor je určen pro kalibraci měřících metod firmy Biosystems specifikovaných v tabulce hodnot.

### SLOŽENÍ

Biochemický kalibrátor. (pro 5 mL). Lyofilizované hovězí sérum obsahuje komponenty v příslušných koncentracích pro kalibraci metod měření.

### PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

1. Opatrně otevřete lahvičku aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Do lahvičky napipetujte přesně 5,00 mL destilované vody. Hodnoty komponentů závisí na přesnosti postupu rekonstituce.
3. Uzavřete lahvičku zátkou a nechte jí stát 20 minut při pokojové teplotě.
4. Opatrně promíchejte, zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění lyofilizátu.
5. Rekonstituovaný materiál použijte jako kalibrátor.

### SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8°C.  
Lyofilizovaný kalibrátor je stabilní do expirace uvedené na štítku lahvičky.  
Komponenty v již jednou otevřeném materiálu jsou stabilní 7 dní při 2-8°C, mimo:  
– Aktivita alkalické fosfatázy se v průběhu prvních dvou hodin po rozpuštění zvýší o 10-20%.  
Pro delší skladování zamraďte.  
Kalibrátor lze zamrazit pouze jednou.

### SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Přesné hodnoty koncentrace komponent a jejich sledovatelnost jsou uvedeny v příložených tabulkách hodnot. Sledovatelnost výsledků může být zaručena pouze za předpokladu použití reagentů a doporučeného postupu měření firmou Biosystems.

### UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 23.1.2018.  
Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí.

Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese: [www.biosystems.es](http://www.biosystems.es)  
Český návod je k dispozici na: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)

### Výhradní distributor:

**ČR** : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5,  
tel.: +420 257 220 760

**SK** : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava,  
tel.: + 421 264 774 591

V případě mimořádných událostí:

**ČR** : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a . LF UK,  
tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

**SK** : Toxikologické informační centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166

### VÝROBCE

**BioSystems S.A.** Costa Brava 30, Barcelona (Spain)  
ISO 13485 - TÜV Rheinland - Reg.: SX 60010383 0001  
ISO 9001 - TÜV CERT - Reg.: 01 100 6696