



kód 18053	1 x 1 mL
SKLADOVÁNÍ PŘI 2-8°C	
Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích	

FERTILITNÍ BIOCHEMICKÁ KONTROLA

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Fertilitní biochemická kontrola je určena pouze ke kontrole kvality a je dodávána v doporučených a akceptovatelných hodnotách.

SLOŽENÍ

Fertilitní biochemická kontrola (pro 1 mL). Lyofilizovaná kontrola obsahující uvedené koncentrace jednotlivých složek a je určena ke kontrole kvantity v klinických laboratořích. Neobsahuje žádné konzervační prostředky, které by mohly interferovat s testem.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

1. Opatrně otevřete lahvičku aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Do lahvičky napipetujte přesně 1,0 mL destilované vody. Hodnoty komponentů závisí na přesnosti postupu rekonstituce.
3. Uzavřete lahvičku zátkou a nechejte ji stát 20 minut při pokojové teplotě.
4. Opatrně promíchejte, zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění lyofilizátu.
5. S rozpuštěnou kontrolou pracujte jako se vzorkem pacienta.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8°C.
Lyofilizovaná fertilitní biochemická kontrola je stabilní do expirace uvedené na štítku lahvičky. Komponenty v již jednou otevřené fertilitní biochemické kontrole jsou stabilní alespoň 15 dní při 2-8°C. Pro delší skladování zamraďte. Opakovaně nezamrazujte!

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Hodnoty pro jednotlivé komponenty jsou uvedeny v tabulce originální příbalové informace včetně návazností. Uvedené hodnoty lze získat pouze za předpokladu používání reagensů BioSystems a doporučeného postupu v návodech.
Doporučené intervaly byly vypočítány na základě předchozích zkušeností v mezilaboratorní variabilitě stanovení. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Každá laboratoř by si měla stanovit své vlastní parametry přesnosti.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu : 23.1.2018.
Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí.

Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese:
www.biosystems.es

Český návod je k dispozici na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5,150 21 Praha5,
tel.: +420 257 220 760

SK : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava,
tel.: + 421 264 774 591

V případě mimořádných událostí:

ČR : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK : Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05,
Limbová 5, tel.: +421 254 774 166

VÝROBCE

BioSystems S.A. Costa Brava 30, Barcelona (Spain)
ISO 13485 - TÜV Rheinland - Reg.: SX 60010383 0001
ISO 9001 - TÜV CERT - Reg.: 01 100 6696